

# VISIÈRE DE PROTECTION FACIALE

Fiche  
« réflexes »

Cette visière peut être utilisée comme visière de protection faciale pour éviter les projections liquides (postillons, particules en suspension) ou la poussière.



## UTILISATION

- Enlever le film protecteur avant utilisation.
- Le bandeau en mousse permet de diminuer la pression.
- Ne génère pas de buée lorsque que vous portez le masque.
- Génère de la buée si le nez touche l'écran, dans ce cas, modifier le réglage en abaissant les bandes agrippantes vers la nuque.
- Génère de la buée lors d'un écart de température significatif.



## ENTRETIEN

- Il est important de bien nettoyer les deux faces, le plus régulièrement possible.
- Il est conseillé de laver cet écran de protection anti postillons avec un tissu microfibre pour ne pas rayer la vitre et du gel hydroalcoolique.
- Attention à bien désinfecter l'intégralité de la visière y compris les lanières. Pensez à ne pas laisser traîner les chiffons souillés une fois l'écran de protection nettoyé.
- 
- Lavez-vous les mains une fois terminé.



## INFORMATIONS

- Les visières de protection transparentes ne remplacent pas les masques, il s'agit d'un complément car cet écran transparent protège avant tous les yeux d'éventuelles projections et permet aux personnes qui portent des lunettes de vue de ne pas les contaminer.
- Cet équipement de protection limite les risques de projections de particules sur les masques donc permet de les garder plus longtemps.