

## ENTRETIEN MASQUES UNS1 LAVABLES

Fiche  
pratique

Le nombre de lavage possible est précisé par le fabricant (il faut se référer à la notice qui accompagne le masque).

Le masque lavable doit être lavé après chaque utilisation avec un maximum de 4 heures. Au bout de 4 heures, le masque doit être changé. (Par exemple, je fais mes courses, je rentre je le lave même si cela ne fait pas 4 heures que je le porte).

Il peut être lavé **au lave-linge** avec le reste du linge à une température de 40° avec de la lessive. C'est l'action combinée de la présence de détergent (lessive) et de la température qui désinfectera le masque.



Il est recommandé (même hors cadre d'épidémie) d'effectuer régulièrement un cycle à 90° à vide pour désinfecter votre lave-linge (cuve, tuyauterie).

**En l'absence de lave-linge**, le masque peut être lavé à la main en respectant l'une ou l'autre des procédures suivantes.



### PROCEDURE 1

- Nettoyer le masque dans un évier ou une baignoire propre avec un détergent (savon, produit vaisselle, lessive) pour éliminer toutes les souillures du visage, de la bouche ou du nez, en le brassant dans l'eau pendant quelques minutes, mais sans le brosser pour ne pas altérer les fibres du tissu.
- Faire tremper le masque dans de l'eau chaude (à une température supérieure à 40°C) pendant une trentaine de minutes.
- Rincer son masque à l'eau claire jusqu'à éliminer tout le détergent et le faire sécher sans attendre.



### PROCEDURE 2

- Mettre le ou les masques dans une baignoire propre dans laquelle vous aurez dilué un détergent (lessive, produit vaisselle, savon) avec de l'eau bouillante chauffée à la bouilloire ou à la casserole.
- Faire tremper jusqu'à refroidissement de la température de l'eau.
- Rincer le ou les masques à l'eau claire jusqu'à éliminer tout le détergent et le faire sécher sans attendre.



Si vous en avez la possibilité et si le masque supporte une température d'environ 120° (il faut se référer à la notice jointe au masque), le repassage à la vapeur, permet de compléter le nettoyage.